

## Odber, skladovanie a transport vzoriek na izoláciu enterovírusu na bunkovej kultúre

### Druh biologického materiálu

- plná krv
- sérum
- plazma
- likvor
- punktát
- exudát
- vzorka tkaniva
- exízia orgánu
- tkanivo
- výterový tampón

### Odberový materiál

- **plná (venózna) krv, sérum, plazma, likvor, punktát, exudát, vzorka tkaniva, exízia orgánu, tkanivo** sa odoberá do čistej, sterilnej skúmavky,
- **výterový tampón** je ponorený vo vírusovom transportnom médiu.

### Skladovanie a transport

- **vzorka** sa do transportu udržiava v chladničke pri +4 až -20°C a transportuje sa na ľade/termoboxe, ak nie je možný transport do 24 hod uvedený materiál treba skladovať v mrazničke.

Vopred konzultovať s laboratóriom.

### Všeobecné pokyny na transport infekčného materiálu na vyšetrenie

- vzorku je potrebné zaslať do referenčného centra čo najskôr (transportnou službou laboratória, kuriérom),
- je nutné dodržiavať platné zásady pre transport infekčného materiálu,
- používať iba jednorazové uzavreté plastové odberové skúmavky alebo mikroskúmavky zabezpečené proti vytečeniu obalením parafilom (nie prelepením) a zabalené v jednorazovom plastovom obale určenom na transport infekčného materiálu, v uzavretých plastových vreckách alebo vhodných transportných nádobách,
- každú odosielanú vzorku je treba označiť štítkom s informáciou o pacientovi, totožnou s informáciou uvedenou na vyplnenej žiadosti o vyšetrenie (meno/kód, rodné číslo/dátum narodenia, dátum a čas odberu).