

Transport a skladovanie biologických vzoriek

Krv a likvor sa uchováva po odbere do transportu v chladničke. V prípade, že sa transport do NRC uskutoční po 24 hodinách, vzorky treba umiestniť v mrazničke a transportuje sa v mrazenom stave.

Na skúmavkách s odobratým materiálom je potrebné riadne vyznačiť: meno pacienta, rok narodenia a druh biologického materiálu.

Vzorky nervového tkaniva na histopatologickú a imunohistochemickú diagnostiku sa uchovávajú a transportujú pri laboratórnej teplote v označených umelohmotných nádobách v 4-10% formole (**NEMRAZIŤ**).

Vzorky nervového tkaniva na glykotypizáciu a dodatočnú izoláciu DNA je potrebné po odbere vložiť do čistej plastovej nádoby, ktorá sa do odvozu uchováva v mrazničke a do NRC sa preváža v mrazenom stave.

Všetky nádoby s tkanivom treba označiť menom, druhom excízie (napr. bazálne gangliá, front. lalok, hemisféra mozgu a pod.) a dátumom odberu. Pri preprave treba dbať na oddelenie vzoriek fixovaných vo formalíne od zmrazených, aby neprišlo k znehodnoteniu fixovaných vzoriek mrazom.